

Apit 11 (OSADA) – ניקוי, חיטוי ועיקור

1. ניקוי וחיטוי

א. הפריטים אותם יש לנקות באמצעות דטרגנט ניטרלי מצויים תחת רשימת "ניקוי" בסעיף 3 להנחיות אלו.
יש לנגב את הלכלוך באמצעות מטלית רכה ולחה עם דטרגנט ניטרלי ולאחר מכן לנגב במטלית יבשה:



וו שפה

מחזיק פוצר עם כבל

מודול כיוון-עצמי

גוף המכשיר

ב. הפריטים אותם יש לחטא מצויים תחת רשימת "חיטוי" בסעיף 3 להנחיות אלו.
לאחר כל שימוש, יש לנגב חלקיקים זרים, כגון נוזלי גוף, שאריות רקמה וכד', באמצעות מטלית לחה הטבולה באלכוהול 70-90% המיועד לשימוש במרפאת השיניים:



וו שפה

מחזיק פוצר עם כבל

אזהרה: אין להשתמש בתמיסות הרפואיות הבאות למטרת חיטוי:

- תרכובות הלוגניות (ובפרט סודיום היפוכלורייט / דקינס): גורמות לבלאי מתכת.
- אלדהידים או פנולים: גורמים לצביעת חלקי פלסטיק ולסדקים.
- תמיסות חומציות: גורמות לבלאי מתכת.

2. עיקור בקיטור

פריטים המתאימים לעיקור באמצעות אוטוקלב מצויים תחת רשימת "עיקור" בסעיף 3 להנחיות אלו.



מחזיק פוצר עם כבל או שפה

מספר דקות נדרש לעיקור	טמפ'
20 דקות ומעלה	121
5 דקות ומעלה	132
3 דקות ומעלה	135

ניתן לבצע 250 סבבים של עיקור חוזר של או השפה ומחזיק הפוצר.

אזהרה: על העיקור באוטוקלב להתבצע כשהפריטים בתוך שקית עיקור.

3. אמצעי ניקוי, חיטוי ועיקור לפריטים השונים:

עיקור	חיטוי	ניקוי	שיטה
			ניגוב בדטרגנט ניטרילי או מים
אוטוקלב קיטור	ניגוב עם אתנול		גוף המכשיר Osada Apit 11
X	X	<input type="radio"/>	מודול כיוון-עצמי
X	X	<input type="radio"/>	מחברי החיישנים (בתוך המודול)
X	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	מחזיק פוצר עם כבל
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	או השפה
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	